


Kontrollera om tecken på plötsligt hjärtstillestånd finns:


reagerar inte andas inte normalt

1 DRA

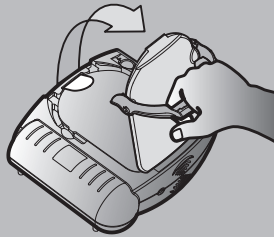


SNABBREFERENS

2 PLACERA


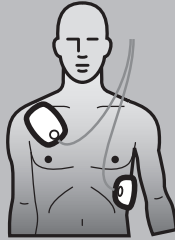


3 TRYCK

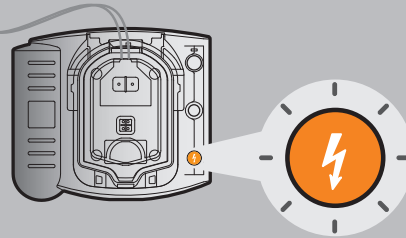


DETALJERADE ANVISNINGAR

För att börja: Dra i handtaget. Avlägsna skyddslocket.

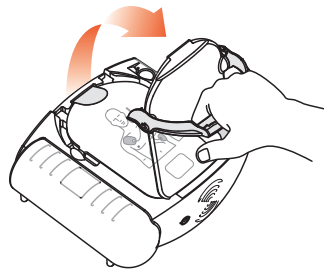
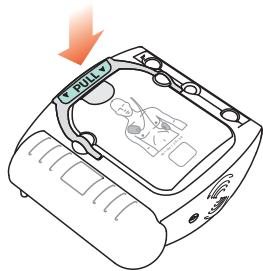


1

Ta bort alla kläder från patientens bröst.
Rengör och torka huden om det behövs.


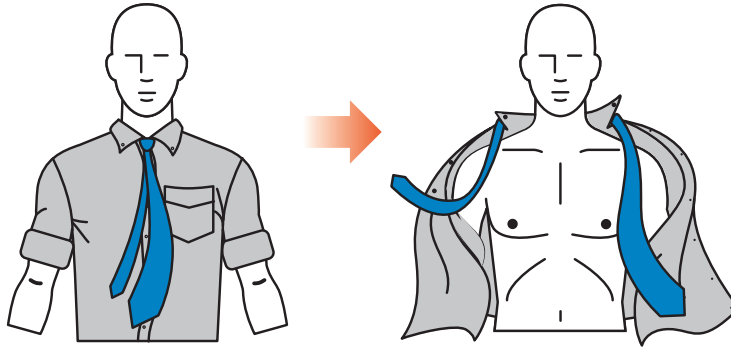


Dra bort filmförseglingen och
avlägsna elektroderna från kassetten.

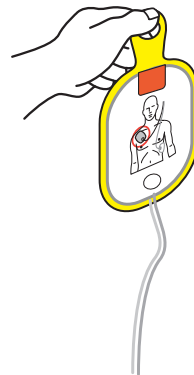
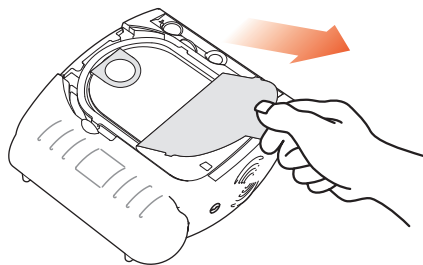


3

Dra bort varje elektrod från det gula plastfodret.

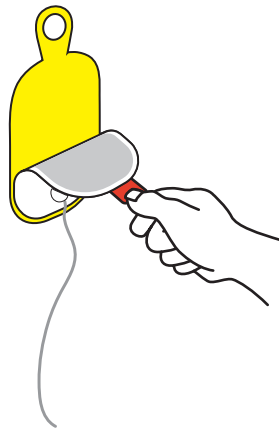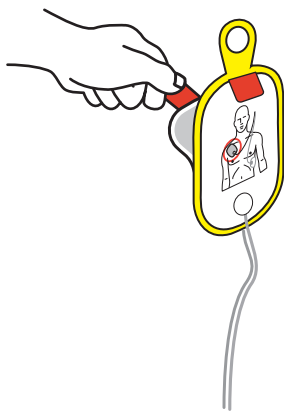


Placera elektroderna exakt
på det sätt som framgår av bilderna.

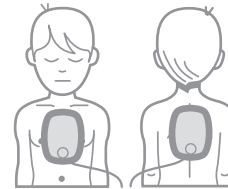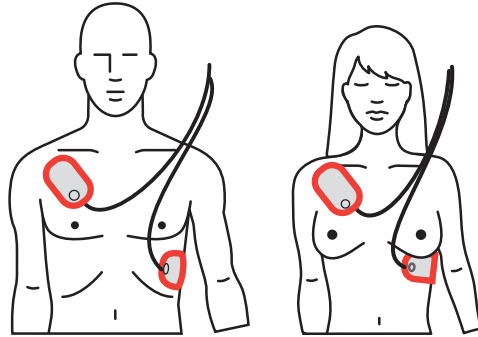


(0-8 ÅR) < 25 kg


Analyserar ... Rör inte patienten!

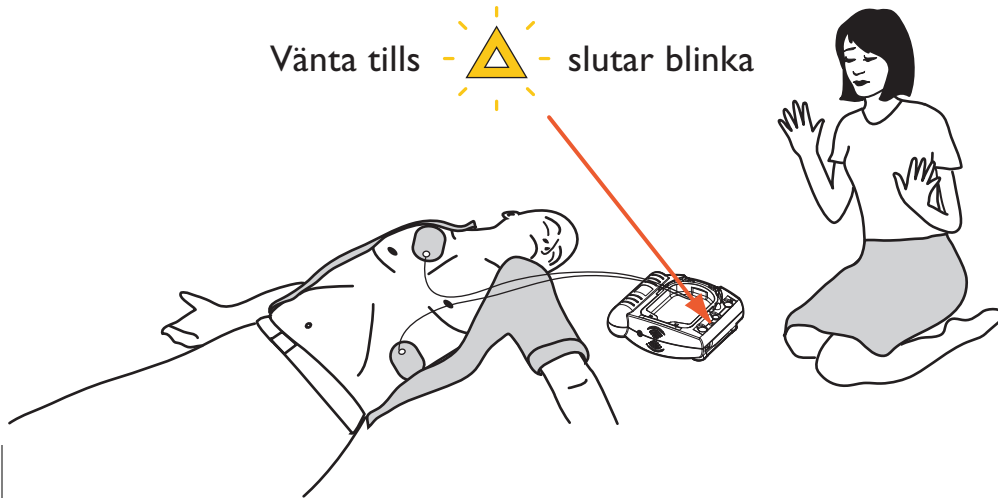

Avge en stöt: Tryck på den blinkande **ORANGE** defibrilleringsknappen. Rör inte patienten.

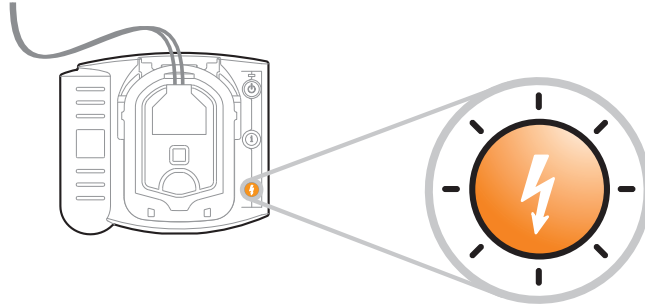


Få hjälp med HLR: Tryck på den blinkande **BLÅ** knappen.

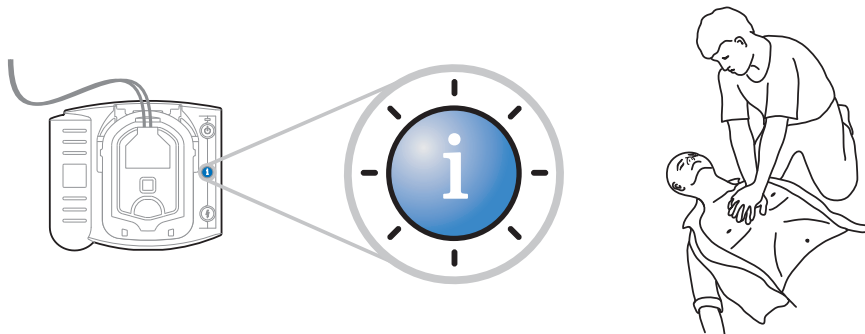


30 sammantryckningar • håll för näsan och luta huvudet bakåt • 2 kompletta andetag **8**

För att slå PÅ: Tryck på den **GRÖNA** på/av-knappen.

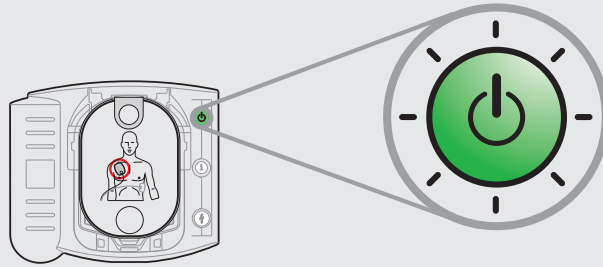

Om kassetten behöver bytas: Skjut spärren åt sidan.

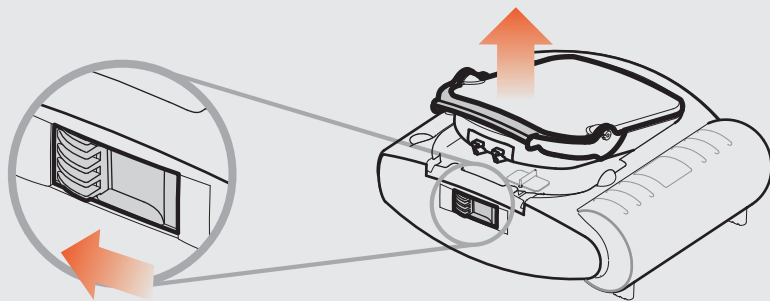

Copyright © 2017
Koninklijke Philips N.V.

453564682691 REV I

CE 0123

REF M5066-97806



453564682691

MADE IN USA



Philips Medical Systems
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431, USA

EC REP

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard Str. 2
71034 Boeblingen, Germany

PHILIPS